

# NOTICE D'UTILISATION

## MASQUE DE PROTECTION EN TISSU CATEGORIE 2




### AVERTISSEMENT

**Pour protéger votre santé et celle des autres,  
il est très important de respecter cette notice d'utilisation.**

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de **l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage**. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessous.

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez**.
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche ET votre nez**.
- Ce masque est destiné à toute personne saine et asymptomatique. Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact de patients.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique d'1 mètre minimum, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

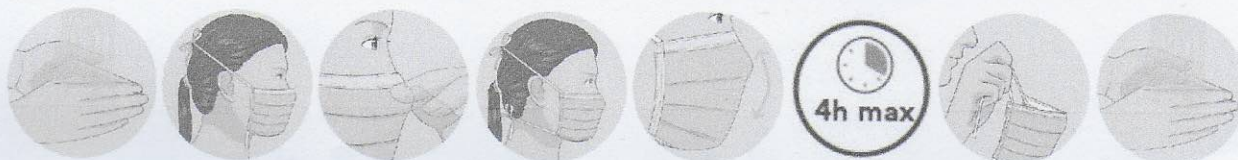

### COMMENT PORTER LE MASQUE ?

#### Avant de le mettre :

1. Laver les masques avant toute utilisation (**1<sup>ère</sup> utilisation comprise**)
2. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
3. Inspectez le masque et assurez vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
4. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, rasée, en évitant le contact avec les cheveux, barbes.
5. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

#### Pour le mettre :

1. Tenez le masque par les liens pour éviter de toucher l'intérieur du masque.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Attachez les liens.
4. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.
5. Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux par une expiration forte.

#### Lorsque vous le portez :

1. Évitez de le toucher et de le déplacer. Si cela se produit, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
2. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

#### Il faut changer le masque :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand vous souhaitez boire ou manger.
3. Quand il devient difficile de respirer.
4. Si le masque s'humidifie.
5. Si le masque est endommagé.
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

#### Pour l'enlever :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
2. Décrochez les liens pour décoller le masque de votre visage (ne pas toucher le devant du masque).
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
4. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
5. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.

### COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

# NOTICE D'UTILISATION

## MASQUE DE PROTECTION EN TISSU CATEGORIE 2



### Avant ouverture :

1. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit propre, sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre - 2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

### Pour le lavage :

1. Lavez le masque à la machine avec de la lessive (l'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée). Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 minutes à une température de 60°C. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
2. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
3. Ce masque a été testé pour 10 lavages. Après 10 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
4. Lorsque la machine est terminée, après s'être lavé les mains, sortez le masque et remettez-le en forme en l'aplatissant et en reformant les plis sans forcer.

### Après le lavage :

1. Après lavage, procédez immédiatement au séchage et stockage.
2. Lavez-vous les mains avant chaque manipulation de masques.
3. Faites sécher le masque dans son intégralité (toutes les couches doivent être totalement sèches).
4. Pour cela, utilisez un sèche-linge (programme modéré), et en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après.
5. Repassez votre masque à 120°C, sans vapeur.
6. Dès que le masque est sec, faites une inspection visuelle et conservez-le dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).
7. Stockez le masque dans un endroit propre, sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre - 2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

## PERFORMANCES

Ce masque de protection à **visée collective** est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques ou un masque d'une autre catégorie.

Il est destiné aux personnes ayant des **contacts occasionnels avec d'autres personnes**. Il est principalement destiné à des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle. Il peut également être destiné au « grand public » pour être utilisé à l'occasion de sorties autorisées dans le contexte du confinement, puis du déconfinement.

1. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 70 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.
2. La respirabilité du masque a été mesurée à 96 L.m<sup>2</sup>.S<sup>-1</sup> pour une dépression de 100 Pa et permet son port pour une durée maximale de 4 heures.